

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Закрепите дозатор к стене при помощи входящих в комплект поставки дюбелей и саморезов.

Перед установкой обратите внимание на следующее:

- дозатор должен быть расположен над раковиной или поддоном для стекания капель с мокрых рук;
- под дозатором для удаления емкости должно быть свободное пространство не менее 15 см;
- над дозатором должно быть свободное пространство не менее 3 см для снятия его со стены;
- высота крепления дозатора 130 – 135 см от пола до верха корпуса.


## ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Вставьте полиэтиленовую емкость со средством в дозатор, предварительно сняв крышку.

Нажав на скобу (рычаг) произведите несколько качков до появления первой порции жидкости из изогнутой трубки выдачи средства.

После этого дозатор готов к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг будет выдаваться мерная доза жидкости.

Объем дозы жидкости можно выбрать по маркировке на гильзе, а приподняв ее и поворачивая, можно выставить требуемую дозу, не разбирая дозатор.

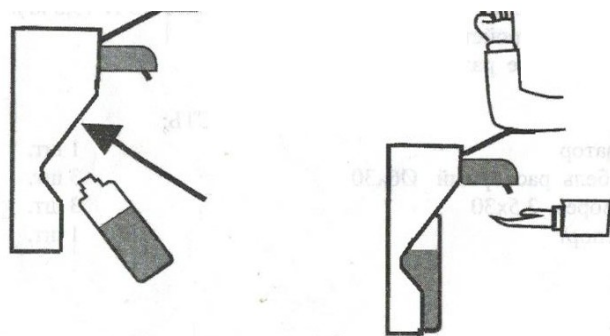

Длительные интервалы бездействия дозатора не приводят к сбою его работы, если емкость остается заполненной.

Быстрая замена пустой емкости на полную обеспечивает готовность дозатора к подаче дозы без холостых прокачек.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Регулярно очищайте наружные поверхности дозатора 0,1% раствором средства чистящего «Панклин ЩП». При необходимости (попадание крови, гноя и др. биологических жидкостей) проводят обработку средствами для экстренной дезинфекции («Ультрацид», «Экстра-Дез»).

Не пользуйтесь абразивными или хлорсодержащими очистителями.

При засорении клапанов необходимо промыть насосную систему без разборки дозатора. Для этого нужно залить в емкость горячую (60-70°C) воду и произвести многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы дозатора.

Полная разборка для дезинфекции дозатора производится следующим образом: 1 - не снимая корпус со стены, нажать пальцем в месте указанном на рисунке; 2 - потянув за носик, достать в сборе кронштейн. Порядок установки дозы подачи раствора: 1- гильзу приподнять по отношению к кронштейну; 2 - повернуть и зафиксировать. Доза, указанная на гильзе - 1,5, 1,8, 2,2 и 2,5 мл, выставляется напротив скобы.

Дезинфекцию проводят путем полного погружения устройства в раствор дезинфектанта («Полидез» 0,5% - 60 мин; «Гексадекон» 0,5% - 60 мин; «Аминоцид» 1,5% - 30 мин; «Гриндез» 2,0% - 15 мин; «Дуацид» 0,25%- 45 мин и др). После чистки и дезинфекции кронштейн ополоснуть проточной водой и вытереть насухо.

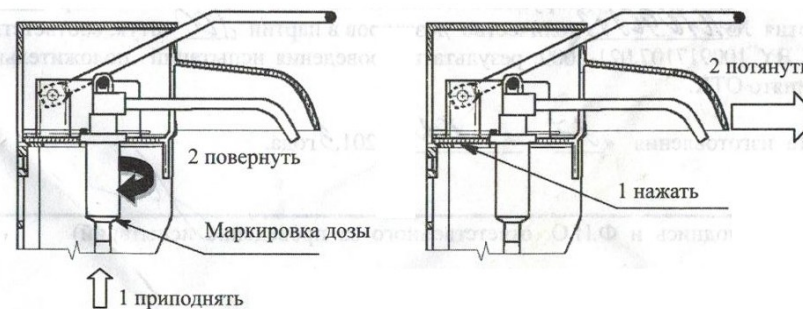

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1. Изготовитель гарантирует соответствие дозатора требованиям

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации дозатора, установленных настоящим паспортом.

2. Проверено на соответствие дозы заявленным параметрам.

3. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со времени изготовления.

4. В течение гарантийного срока, по предъявлении дозатора, паспорта и рекламации, изготовитель бесплатно устраняет выявленные дефекты по вине изготовителя или производит замену дозатора или его части.

5. Гарантии изготовителя не распространяются на дефекты дозатора, причиной которых послужили:

- несоблюдение покупателем правил эксплуатации и технического обслуживания, в том числе использование не по прямому назначению или для работы с непредусмотренными жидкостями;

- допуск к работе с дозатором лиц, не изучивших правила эксплуатации и технического обслуживания дозатора в соответствии с настоящим паспортом;

- механическое, химическое или иное постороннее воздействие, не предусмотренное условиями эксплуатации дозатора;

- самостоятельное, несогласованное с изготовителем переоборудование дозатора, внесение в его конструкцию изменений или самостоятельный ремонт.

6. В случае использования дозатора третьим лицом, ответственность за соблюдение им требований, установленных, настоящим паспортом несет покупатель.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010 номер 410  
партия № 10109013 количество дозаторов в партии 300 штук, соответствует  
ТУ ВУ 100917107.021-2009, результаты проведения испытаний положительные,  
принято ОТК.

Дата изготовления «27» 02 2013 года.

\_\_\_\_\_  
(подпись и Ф.И.О. ответственного за проведение испытаний)

Место Штампа



Закрытое акционерное общество «БелАсептика»  
РБ, 223043, Минский район, деревня Цнянка, в/г 137 «А»,  
Административное здание ЗАО «БелАсептика»

#### Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010

ТУ ВУ 100917107.021-2009


#### ПАСПОРТ

БА.01.000 ПС

Регистрационное удостоверение  
№ ИМ-7.96424 от 15.04.2010 года

Устройство дозирующее локтевое настенное ДУ-010 (далее - дозатор) предназначен для порционной подачи на кожу рук антисептических, дезинфицирующих средств и жидкого мыла из литровых пластмассовых емкостей.

Дозатор может быть использован в организациях здравоохранения, на предприятиях пищевой отрасли, общественного питания, торговли, на рынках, предприятиях бытового обслуживания, коммунальных объектах, в быту и т.д.

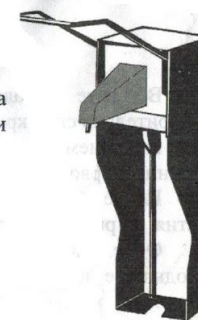

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Привод устройства - локтевой.
2. Режим работы - многократный, циклический.
3. Максимальное усилие на рычаге не более 35 Н (3,5 кг).
4. Масса устройства не более 0,6 кг.
5. Габаритные размеры: 320x240x100 мм

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- |                           |       |
|---------------------------|-------|
| 1. Дозатор                | 1 шт. |
| 2. Дюбель распорный Ø6x30 | 3 шт. |
| 3. Саморез 3,5x30         | 3 шт. |
| 4. Паспорт                | 1 шт. |